

توربین بلک پرل اکو




توضیحات


توربین بلک پرل از پر فروش ترین توربین های کمپانی بین ایر سوئیس می باشد که قیمت استثنایی و اقتصادی این توربین محبوبیت آن را دو چندان کرده است. ساینز متوسط هد این توربین کاربرد آن را در همه جا ممکن می سازد. توربین بلک پرل تنها مدل توربین ته ثابت بین ایر می باشد که شامل دو نوع اتصال می باشد. انتخاب هر کدام از آن ها بستگی به شلنگ یونیت شما دارد :

بلک پرل 2 سوراخه (برای اتصال به شلنگ های 2 سوراخه یونیت)

بلک پرل 4 سوراخه (برای اتصال به شلنگ های 4 سوراخه یونیت)

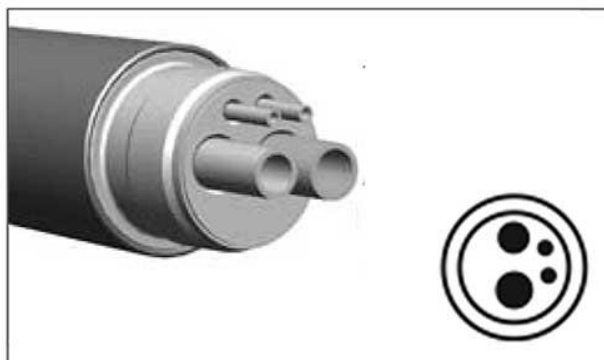

محل اتصال توربین 4 سوراخه

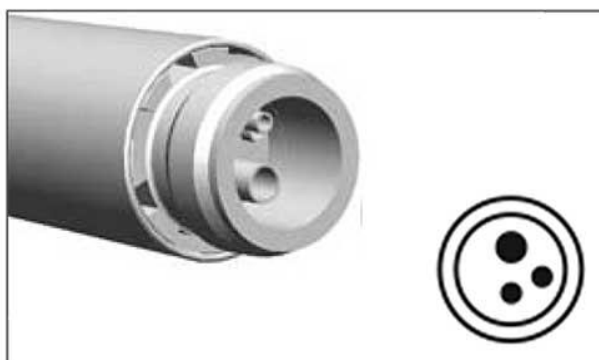


محل اتصال توربین 2 سوراخه

تکنولوژی Accu-Spray (تکنولوژی اسپری جداگانه آب و هوا)

در اینسترومنت های روتاری دندانپزشکی، سیستم خنک سازی آن بسیار مهم است و فرز و محل تراش را باید به صورت مناسبی خنک سازد.

شرکت بین ایر با تکنولوژی انحصاری خود (در نظر گرفتن مسیر جداگانه برای آب و هوا) چند مزیت اساسی نسبت به رقبای خود دارد:


- 1- خنک شدن سریع فرز، به این صورت است که هوا در نقطه ای بسیار دقیق با آب برخورد کرده و آب را قبل از تماس با فرز پودر می کند. این پودر فوق العاده ریز آب، فرز و مواد دندانی را به سرعت خنک می کند.
- 2- مسیر جداگانه آب و هوا از گرفتگی مجراها (نازل ها) پیشگیری می کند.
- 3- تمیز شدن سریع دندان که دید کاملی برای دندانپزشک فراهم می کند.

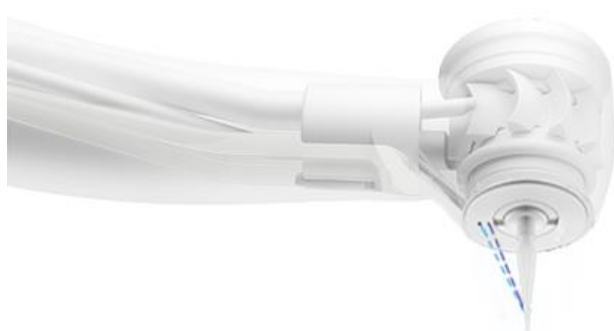

تکنولوژی Accu-chuck (تکنولوژی فرزگیر و چرخش دقیق فرز)

حرکات دست دندانپزشک باید بدون هر دخالتی به دندان بیمار انتقال یابد. به همین دلیل، دقت و حساسیت اینسترومنت شما حائز اهمیت است.

اینسترومنت های بین ایر دارای تکنولوژی فرزگیر و چرخش دقیق فرز می باشد. این تکنولوژی باعث قفل شدن بسیار دقیق فرز و جلوگیری از لرزش و ارتعاش آن می شود، در نتیجه ضامن راحتی و دقت کار برای دقیق ترین اعمال دندانپزشکی می باشد. این دقت بی نظیر مزیت دیگری هم دارد و آن طولانی تر شدن عمر فرز است.

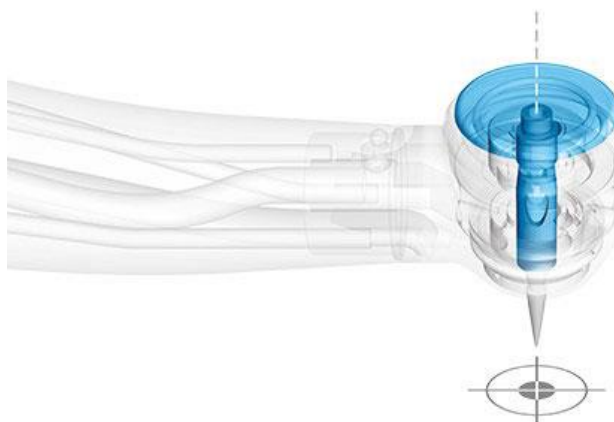

تکنولوژی Soft Push (تکنولوژی تعویض آسان فرز)


در اینسترومنت های بین ایر سیستم تعویض یا خارج کردن فرز به صورت دکمه ای (push button) است. بین ایر این دکمه را به صورتی طراحی کرده است که فقط فشار کمی برای جا انداختن، خارج کردن و تعویض فرز لازم است و در کوتاهترین زمان ممکن قابل انجام است.



تکنولوژی Cool Touch™ (تکنولوژی دکمه تعویض فرز ضد حرارتی)

BIEN-AIR تنها تولید کننده در جهان است که مکانیزم دکمه تعویض فرز اینسترومنت های آن (دکمه پوش باتن) با یک سیستم ایمنی ضد حرارتی همراه است.

این مسئله موجب کاهش خطر سوزاندن دهان بیماران با هد اینسترومنت می شود. این مکانیزم به این صورت است که یک ساچمه از جنس تنگستن بین دکمه ی پوش باتن و بالای فرز گیر قرار داده شده است. این ساچمه حرارت را حتی زمان استفاده از اینسترومنت (زمان چرخش فرز) جذب کرده و از گرم شدن دکمه ی پوش باتن جلوگیری می کند. این اختراع منحصر به بین ایر و برای ایمنی بیشتر دندانپزشکان و بیماران می باشد.

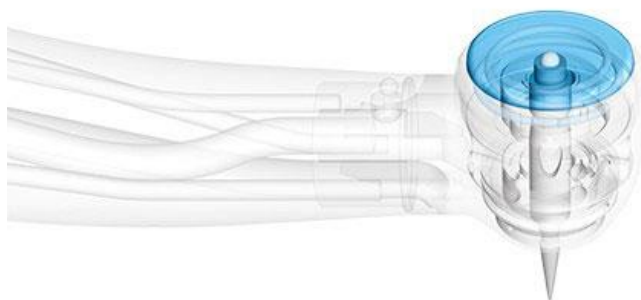

جدول اطلاعات فنی توربین بین ایر

مدل	بلک پرل
قدرت (وات)	13
تعداد اسپری آب و هوا	1 مسیر جداگانه آب و 1 مسیر هوا
شدت صدا (دسی بل)	62
قطر هد (mm)	12
سایز هد (mm)	13.8 20.5 با فرز 19mm
سرعت چرخش (دور در دقیقه)	310,000
سیستم روشنایی	-
شدت روشنایی (Klux)	-
بلبرینگ سرامیکی	ندارد
وزن (گرم)	50
کوپلینگ	2-3 سوراخه و 4 سوراخه
رفرنس	1600039 1600040
ساخت	سویس
گارانتی	24 ماهه نیکنام طب